


PRODUCT CATALOG

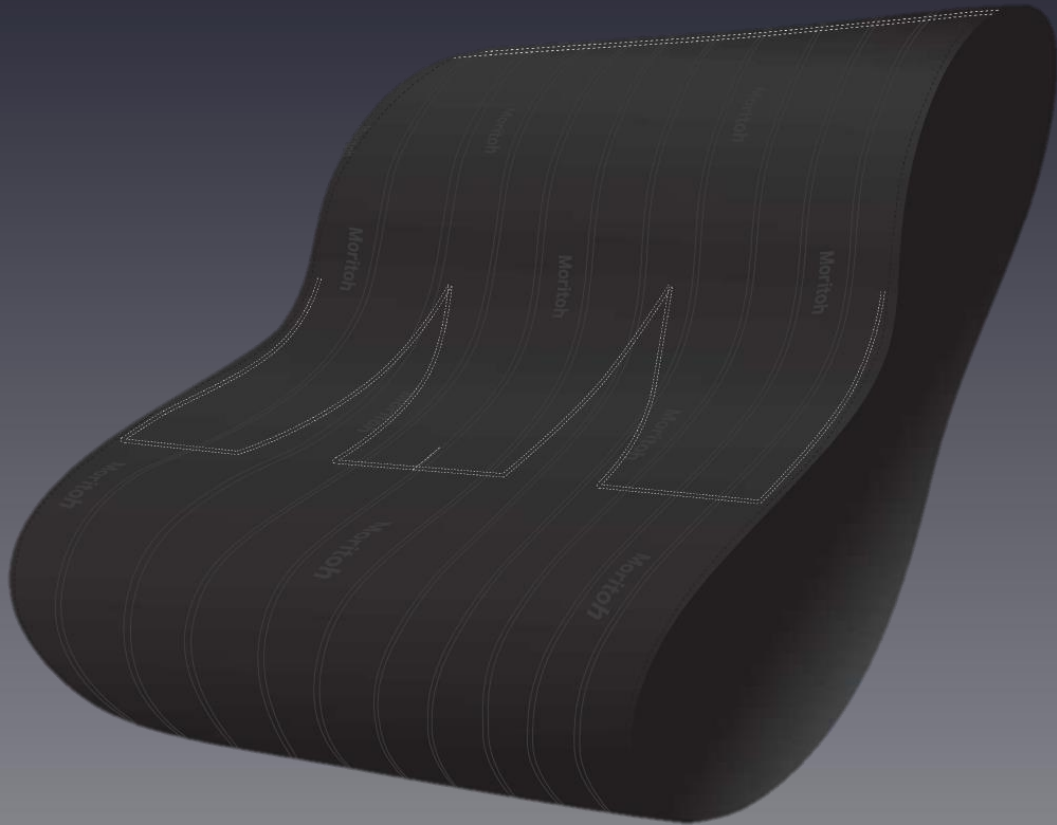

Sliding Sheet: IZAEMON

IZAEMON SHEEGLO



ป้องกันการ
เกิดแผลกดทับ

จัดท่านอน
บนเตียง

เคลื่อนย้าย
บนเตียง

ข.พ. 115/2568

ใบรับจดแจ้งที่ 67-2-3-2-0010420

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ผ้าช่วยเคลื่อนย้ายถูกออกแบบมาให้ผู้ดูแลสามารถจัดท่าหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ได้ ลดความเสี่ยงของผู้ดูแลในการยกหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมถึงช่วยป้องกัน
การเกิดแผลกดทับในผู้ป่วย



สแกนเพื่อดูวิดีโอ
ตัวอย่างการใช้งาน


IZAEMON SHEEGLO

การเคลื่อนย้ายบนเตียง

แบ่งพับ 1 ใน 3 ส่วนของผ้า



จับตรงรอยพับและสอดเข้าทางใต้หมอน

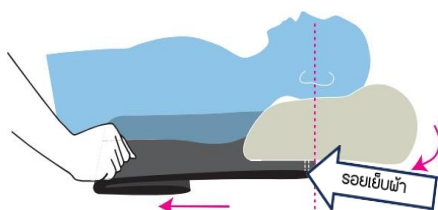

สอดผ้าผ่านตัวผู้ใช้งานจนกว่าขอบผ้าจะอยู่ตรงกับหูผู้ใช้งาน (ให้ปลายผ้าอยู่บริเวณหมอน)


ดึงผ้าด้านล่างให้ถึง
สะโพกผู้ใช้งาน



หากดึงผ้าได้ไม่ตรงเท่าที่ควร ให้เอียงสะโพกผู้ใช้งานและดึงให้ตรง


การเคลื่อนย้าย-ขวบนเตียง

สอดมือเข้าช่องกลางแล้วดึงผ้าให้ตึง

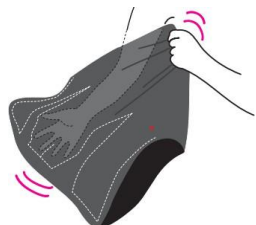


สอดผ้าเข้าไป

บริเวณไหล่หรือ
สะโพกที่รับน้ำหนัก

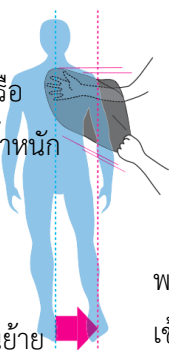

ขยับขาผู้ใช้งาน
ไปในทางที่จะเคลื่อนย้าย

พลิกตัวผู้ใช้งาน
เข้าหาตัวผู้ช่วยเหลือ

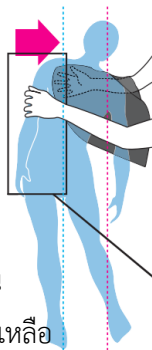


ในส่วนของสะโพก
ให้ทำแบบเดียวกัน



ในการเคลื่อนย้ายให้สอด
ผ้าในตำแหน่งที่จะเคลื่อน
ย้าย เพื่อความสะดวกสบาย

การลดแรงกดทับบนเตียง


สอดมือเข้าไปในช่องซ้ายหรือขวาแล้ว
ดึงด้านตรงข้ามให้ตึง

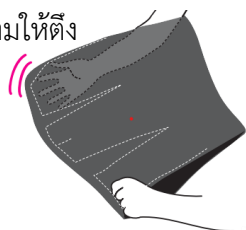

สอดผ้าเข้าใต้
ตัวผู้ใช้งาน และค่อยๆดึง
ไปทางปลายเท้า



ดึงผ้าด้านตรงข้าม
เพื่อให้ดึงผ้าได้
สะดวกมากขึ้น

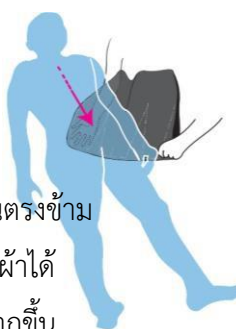


สามารถช่วย
ลดแรงกดทับ
บนส่วนต่างๆ
ของร่างกาย



พลิกตัวบนเตียง

ให้ตะแคงผู้ใช้งานไปทางใด ทาง
หนึ่งของเตียง

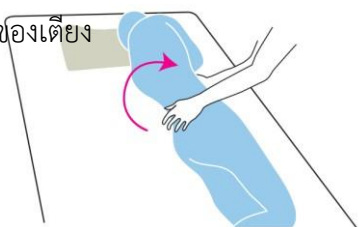

สอดผ้าไว้ใต้หลังของผู้ใช้งาน



พลิกตัวนอนหงาย
แล้วขยับแขนไป
ทางด้านที่จะพลิกตัว



ค่อยๆพลิก
ตัวผู้ใช้งาน




กรณีพลิกพร้อมขยับผู้ใช้งาน
ให้ทำการพลิกไปด้านที่
ต้องการและสอดผ้าบริเวณ
หลังของผู้ใช้งาน จากนั้นดัน
สะโพกไปยังฝั่งที่ต้องการ

IZAEMON SHEEGLO

(IZAEMON 210)

- ผลิตจากผ้าไนลอน
- ช่องสอดมือ 3 ช่อง
- ขนาด 75 x 70 ซม.

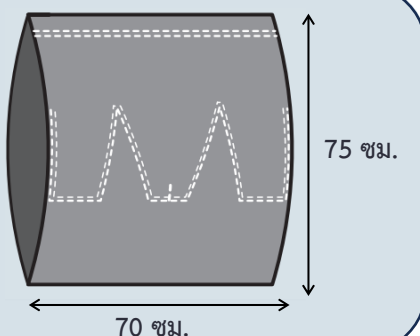

Sliding Sheet: IZAEMON

IZAEMON SHEET BLACK



ป้องกันการเกิด
แผลกดทับ

จัดท่านอน
บนเตียง

เคลื่อนย้าย
บนเตียง

ฉพ. 115/2568

ใบรับจดแจ้งที่ 67-2-3-2-0010420

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ผ้าช่วยเคลื่อนย้ายถูกออกแบบมาให้ผู้ดูแลสามารถจัดท่าหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ลดความเสี่ยงของผู้ดูแลในการยกหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมถึงช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วย



สแกนเพื่อดูวิดีโอ
ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน

1. วิธีการสอดผ้าและดึงผ้าออก



จัดทำผู้ป่วยอยู่ในท่ากอดอก จากนั้นสอดผ้าจากใต้หมอน จนถึงบริเวณกลางหลัง



หากไม่สามารถสอดผ้าถึงกลางหลังได้ ให้ยกไหล่ผู้ป่วยขึ้นจากด้านหลังและดึงผ้าที่ละข้าง



กदन้าหนักลงบริเวณหมอน และดึงผ้าออกทางด้านข้าง

2. วิธีการเคลื่อนผู้ป่วยไปทางศีรษะ



จัดทำผู้ป่วยให้ยกต้นขาขึ้น จากนั้นประคองบริเวณไหล่และหัวเข่าแล้วให้ผู้ป่วยเหยียดขาเพื่อดันตัวขึ้น



หรือทำการประคองสะโพกและต้นผู้ใช้งาน เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ใช้งานไปด้านศีรษะ




หรือใช้เข็มขัดคาดบริเวณใต้ต้นขาของผู้ป่วย แล้วออกแรงดึงเบาๆ เพื่อเคลื่อนตัวทางศีรษะ



สำหรับผู้ป่วยน้ำหนักมากหรือที่นอนนุ่ม ให้เพิ่มผ้าอีกผืนบริเวณใต้สะโพก

3. วิธีการเคลื่อนผู้ป่วยไปด้านข้าง

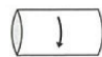

พลิกตัวผู้ป่วยให้หันไปอีกฝั่งของผู้ดูแล แล้วสอดผ้าใต้ลำตัวผู้ป่วย



พลิกตัวผู้ป่วยกลับมา จากนั้นทำการจับไหล่และสะโพกของผู้ป่วยแล้วดึงเข้าหาตัวผู้ดูแล




วางผ้าช่วยเคลื่อนย้ายไว้ใต้ผ้าห่มหรือผ้าอื่นๆ ที่รองใต้ตัวผู้ป่วย ดึงผ้าห่มช้าๆ เพื่อเคลื่อนผู้ป่วยในแนวด้านข้าง




ใช้ผ้าห่มเพื่อช่วยดึงร่างกายของผู้ป่วยขึ้นอย่างช้าๆ ในแนวทแยง จากนั้นสามารถเปลี่ยนท่าการนอนผู้ป่วยในตำแหน่งที่ต้องการ


IZAEMON SHEET BLACK

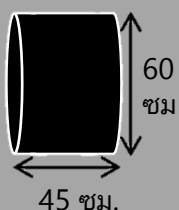

Size S
(IZAEMON 110)

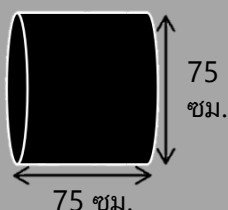

Size M
(IZAEMON 120)

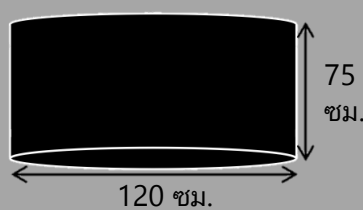

Size ML
(IZAEMON 130)



Size L
(IZAEMON 140)

เครื่องยกและเคลื่อนย้าย TSURUBE รุ่น Y6 Li-Pink

ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว ช่วยให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงไปยังรถเข็นหรือสถานที่อื่นๆ และสามารถใช้ในการฝึกเดินเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเดิน หรือผู้ที่อยู่ในช่วงพักฟื้นหลังการผ่าตัด


รับน้ำหนักได้สูงสุด
120 กิโลกรัม



TSURUBE Y6 Li-Pink เพื่อยกและเคลื่อนย้าย



TSURUBE Y6 Li-Pink เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย

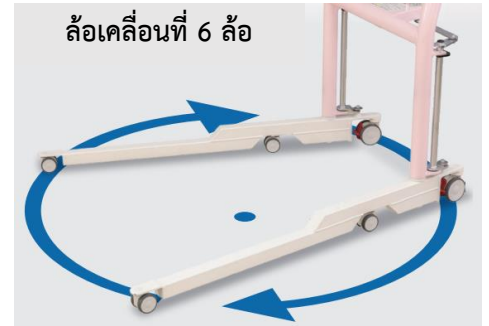

ล้อยเคลื่อนที่ 6 ล้อ

ติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักผู้ป่วย



ข้อมูลเฉพาะผลิตภัณฑ์

ความเร็วในการยก	• ยกขึ้น 36.3 มม./วินาที • ยกลง 37.2 มม./วินาที
การชาร์จไฟ	AC 220V – 50 Hz
ความสูงในการยก	• สูงสุดจากพื้น 1,720 มม. • ยกต่ำสุดจากพื้น 360 มม.
ความสูงในการยก (กรณีติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนัก)	• สูงสุดจากพื้น 1,560 มม. • ต่ำสุดจากพื้น 200 มม.
ฟังก์ชันความปลอดภัย	• ปุ่มลดระดับฉุกเฉิน • สวิตช์ฉุกเฉิน(Emergency)
วัสดุของอุปกรณ์	เหล็ก

ขพ. 117/2568

ใบรับจดทะเบียนที่ 67-2-3-2-0010230

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ผ้ายกผู้ป่วยรุ่น EVE/PAO



ผ้ายกผู้ป่วย รุ่น EVE

- ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายไปที่เตียง รถเข็น อ่างอาบน้ำ เป็นต้น
- สามารถใส่และถอดออกได้ขณะผู้ป่วยนั่งบนรถเข็น



EVE Half

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีคอและ
ลำตัวค่อนข้างแข็งแรง



EVE Full

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีคอและ
ลำตัวค่อนข้างอ่อนแรง

EVE Half Small (EVE220)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูง 135-150 ซม.
EVE Half Medium (EVE210)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูง 150-190 ซม.
EVE Full Small (EVE250)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูง 135-150 ซม.
EVE Full Medium (EVE240)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูง 150-190 ซม.



ผ้ายกผู้ป่วย รุ่น PAO

- สามารถใส่และถอดออกได้ในขณะที่ผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียง
- ผีระบายอากาศได้



PAO Half

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีคอและ
ลำตัวค่อนข้างแข็งแรง



PAO Full

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีคอและ
ลำตัวค่อนข้างอ่อนแรง

PAO Half (PAO100)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูงไม่เกิน 180 ซม.
PAO Full (PAO120)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูงไม่เกิน 175 ซม.
PAO Long (PAO130)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูงไม่เกิน 190 ซม.

ผ้ายกผู้ป่วย รุ่น PAO Mesh Blue


- ผ้ามตาข่ายช่วยให้ในการระบายน้ำ
- สำหรับการเคลื่อนย้ายไปยังอ่างอาบน้ำ
- สายแขวนผู้ป่วยสามารถถอดออกจาก
ผ้าได้ขณะผู้ป่วยนั่งหรือเอนตัว



PAO Mesh Blue Half



PAO Mesh Blue Full

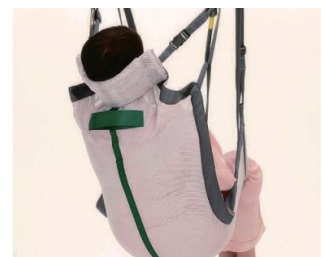

PAO Mesh Gray

ผ้ายกผู้ป่วย รุ่น PAO Mesh Gray

- ผ้ามัลักษณะเป็นตาข่ายเหมาะสำหรับการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังอ่างอาบน้ำ
- รองรับบริเวณคอผู้ป่วย และสามารถใช้งาน
กับผู้ป่วยที่เจาะคอ (tracheostomy) ได้

PAO Mesh Blue Half (PAO140)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูงไม่เกิน 180 ซม.
PAO Mesh Blue Full (PAO150)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูงไม่เกิน 175 ซม.
PAO Mesh Gray Small (PAO350)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูง 135-150 ซม.
PAO Mesh Gray Medium (PAO340)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูง 159-190 ซม.



อุปกรณ์ช่วยพยุงและรองรับน้ำหนัก ช่วยให้ผู้ใช้งานฝึกการทรงตัวและการเคลื่อนไหว รวมถึงผู้ใช้งานที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัดหรือบาดเจ็บ โดยช่วยฝึกการเคลื่อนไหว อุปกรณ์นี้สามารถช่วยพยุงน้ำหนักผู้ใช้งานได้ 0-40 กิโลกรัม ทำให้ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บบริเวณขาและข้อเข่าในการรับน้ำหนักร่างกาย



อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

POPO series

Non-weight bearing type lift: **popo**



สายรัด (Harness) ที่ใช้งานร่วมกับเครื่องช่วยพยุงเดิน POPO

Harness Hybrid



Size SS (HV-100)	ความยาวรอบเอว 55-65 ซม.
Size S (HV-110)	ความยาวรอบเอว 65-75 ซม.
Size M (HV-120)	ความยาวรอบเอว 75-90 ซม.
Size L (HV-130)	ความยาวรอบเอว 90-100 ซม.
Size LL (HV-140)	ความยาวรอบเอว 100-110 ซม.

Harness Light



Size S (L-110)	ความยาวรอบเอว 72-86 ซม.
Size M (L-120)	ความยาวรอบเอว 86-100 ซม.
Size L (L-130)	ความยาวรอบเอว 100-114 ซม.

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ของ POPO

น้ำหนักที่อุปกรณ์รองรับ	100 กิโลกรัม
ระยะของการยก	590-1,360 มิลลิเมตร
การชาร์จไฟ	AC 220 Volt -50Hz
ระบบความปลอดภัย	- ปุ่มลดระดับฉุกเฉิน - สวิตช์ฉุกเฉิน (EMERGENCY)
วัสดุของเครื่อง	เหล็ก
น้ำหนักของตัวเครื่อง	35 กิโลกรัม
แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)	แบตเตอรี่ชนิด Small sealed storage ES2.9-12.12V.2.9Ah, 2 ก้อน



ขพ. 239/2568

ใบรับจดแจ้งที่ 68-2-3-2-0001162

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Suspension Rehabilitation Lift

เครื่องพยุงผู้ป่วยแบบรองรับน้ำหนักร่างกายทั้งหมด



รับน้ำหนักได้สูงสุด 100 กิโลกรัม

- ที่แขวนแบบสปริงที่ปรับตัวตามแรงและการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย
- ล้อเคลื่อนที่ขนาด 125 มม. เพื่อให้เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
- ปรับทิศทางเคลื่อนที่ของล้อทั้ง 4 ได้ในทางทิศทางตรง หมุน อิสระและหยุดทั้ง 4 ล้อ
- ราวจับปรับความสูงได้ตามความเหมาะสมของผู้ป่วย
- ปรับระดับแรงพยุงร่างกายด้วยสวิตช์ควบคุม
- ติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนัก เพื่อใช้วัดปริมาณน้ำหนักผู้ป่วยที่ถูกพยุง

Suspension Rehabilitation Lift: TG-800 : ฐานเครื่องกว้าง 800 มม.
(TG-800)

Suspension Rehabilitation Lift: TG-1000 : ฐานเครื่องกว้าง 1,000 มม.
(TG-1000)

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

ระยะการยก (ต่ำสุด-สูงสุด)	1,370-2,260 มิลลิเมตร
การชาร์จไฟ	AC 220 Volt -50Hz
ระบบความปลอดภัย	- ปุ่มลดระดับฉุกเฉิน - สวิตช์ฉุกเฉิน (EMERGENCY)
วัสดุของเครื่อง	เหล็ก

สายรัด รุ่น Harness Hybrid



- สายรัดชนิดคลุมต้นขา เหมาะสำหรับผู้ป่วยต้องการการพยุงมาก
- สายรัดรองรับกระดูกเชิงกรานเพื่อช่วยพยุงการแกว่งของขา
- สวมใส่ขณะผู้ป่วยอยู่ในท่านอน หรือทำยืนได้

Size SS (HV-100)	ความยาวรอบเอว 55-65 ซม.
Size S (HV-110)	ความยาวรอบเอว 65-75 ซม.
Size M (HV-120)	ความยาวรอบเอว 75-90 ซม.
Size L (HV-130)	ความยาวรอบเอว 90-100 ซม.
Size LL (HV-140)	ความยาวรอบเอว 100-110 ซม.

สายรัด รุ่น Harness Light



- สายรัดร้อยผ่านบริเวณขาหนีบทำให้ใส่และถอดได้ง่าย
- สวมใส่ขณะผู้ป่วยนั่งบนรถเข็นได้
- สายรัดบริเวณขาหนีบมีฟองน้ำด้านใน

Size S (L-110)	ความยาวรอบเอว 72-86 ซม.
Size M (L-120)	ความยาวรอบเอว 86-100 ซม.
Size L (L-130)	ความยาวรอบเอว 100-114 ซม.



ขพ. 2075/2568

ใบรับจดแจ้งที่ 68-2-3-2-0004545

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

The suspension lift rail system



ระบบช่วยพยุงติดตั้งบนรางบนเพดาน ออกแบบมาเพื่อผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว ให้การพยุงตัวแบบ Non-Weight Bearing ที่สามารถปรับระดับได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล ช่วยลดความเสี่ยงการบาดเจ็บที่ขาและข้อเข่าในการลงน้ำหนักระหว่างการเคลื่อนไหวและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

- **SS-300 (Rail-Mounted Non-Weight Bearing Lift, Manual)**

เครื่องพยุงผู้ป่วยแบบ Manual ใช้งานร่วมกับสายรัดพยุง (Harness) และปรับระดับการพยุงน้ำหนักได้โดยผ่านระบบสายรัดที่มีรหัสสี (Color-Coded Strap System)

Spring Hanger

ที่แขวนพยุง (Hanger) แบบสปริงที่ปรับให้เข้ากับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยได้ไม่ว่าจะเป็นการก้าวเดิน การลงน้ำหนัก ช่วยผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ

Option: ติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักเพิ่มเติมได้ เพื่อวัดระดับการพยุงน้ำหนัก



สายรัด รุ่น Super Light

Size S (SL-110)	รอบเอว 53-68 ซม.
Size M (SL-120)	รอบเอว 68-88 ซม.
Size L (SL-130)	รอบเอว 88-105 ซม.



สายรัด รุ่น Harness Light

Size S (L-110)	รอบเอว 72-86 ซม.
Size M (L-120)	รอบเอว 86-100 ซม.
Size L (L-130)	รอบเอว 100-114 ซม.



สายรัด รุ่น Harness Hybrid

Size SS (HV-100)	ความยาวรอบเอว 55-65 ซม.
Size S (HV-110)	ความยาวรอบเอว 65-75 ซม.
Size M (HV-120)	ความยาวรอบเอว 75-90 ซม.
Size L (HV-130)	ความยาวรอบเอว 90-100 ซม.
Size LL (HV-140)	ความยาวรอบเอว 100-110 ซม.

Sliding Board: IZAEMON ROLA



※ เตียงผู้ป่วยเป็นภาพประกอบการโฆษณาเท่านั้น

IZAEMON ROLA-1800 ขนาด 1800 x 500 x 16 มม.
(ROLA-1800)

IZAEMON ROLA-1000 ขนาด 1000 x 500 x 16 มม.
(ROLA-1000)

คำเตือน: ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายที่มีระยะทางไม่เกิน 15 ซม.

- ◆ แผ่นบอร์ดช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงไปยังเปลหาม, วีลแชร์ปรับเอน
- ◆ ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บของผู้ดูแลและผู้ป่วยระหว่างเคลื่อนย้าย
- ◆ บอร์ดพับครึ่งได้ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บและพกพาสะดวก

“สามารถพับครึ่งได้ เคลื่อนย้ายสะดวก”



ขพ. 2075/2568

ใบรับจดแจ้งที่ 68-2-3-2-0003722

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Sliding Board: IZAEMON Board Blue



Hip cut

IZAEMON Board Blue

ขนาดเมื่อกาง	290 x 618 มม.
ขนาดเมื่อพับ	146 x 618 มม.
น้ำหนัก	650 กรัม
วัสดุ	Polypropylene (PP)

คำเตือน: ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายที่มีระยะทางไม่เกิน 10 ซม.

※ เตียงและรถเข็นผู้ป่วยเป็นภาพประกอบการโฆษณาเท่านั้น

- ◆ Hip Line Cut ช่วยให้หาตำแหน่งสอดบอร์ดได้ง่ายขึ้น
- ◆ บอร์ดสามารถพับเก็บได้สองชั้น เคลื่อนย้ายสะดวก
- ◆ เมื่อพับแล้วมีความกว้างไม่ถึง 15 ซม. ทำให้มีขนาดกะทัดรัด จัดเก็บง่าย

ขพ. 2075/2568

ใบรับจดแจ้งที่ 68-2-3-2-0007754

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Corporate Profile

สำนักงานในประเทศไทย

ชื่อบริษัท: บริษัท ไทย โมริโตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Thai Moritoh Corporation Co., Ltd.

ที่อยู่: 147/130 หมู่ 1 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270

ก่อตั้งเมื่อ: 07/2024

✉ info@thaimoritoh.co.th

🌐 http://www.thaimoritoh.co.th

☎ 061-5814163, 082-5506058

f Thai Moritoh-อุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยกายภาพบำบัด



สำนักงานในประเทศญี่ปุ่น

ชื่อบริษัท: Moritoh Co., Ltd.

ที่อยู่: 3-36 Higashijimacho, Ichinomiya City,
Aichi Prefecture, 491-0074, JAPAN

ก่อตั้งเมื่อ: 01/1937

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายเครื่องยกผู้ป่วยสำหรับการดูแล (Nursing care lift) และอุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงการให้เช่าและจำหน่ายอุปกรณ์สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย ตามกฎหมายประกันการดูแลระยะยาว (Long-Term Care Insurance Act)

✉ info@moritoh.co.jp

🌐 http://www.moritoh.co.jp



บริษัท ไทย โมริโตะ คอร์ปอเรชั่น ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายนวัตกรรมเพื่อการฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุจากญี่ปุ่น ด้วยประสบการณ์และได้รับความไว้วางใจยาวนานกว่า 88 ปีของบริษัท ไทย โมริโตะ คอร์ปอเรชั่น เรามุ่งมั่นนำเสนอเทคโนโลยีคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทย

